

## BRUGERVEJLEDNING

### Remo-wax® ørevoksopløsende ørespray

#### Virkning og anvendelse

Remo-wax ørespray løser ørevoks og ørevokspropper.

#### Brug ikke Remo-wax hvis

- øret er betændt eller gør ondt
- der flyder sekret ud af øret
- trommehinden er beskadiget, perforeret eller er blevet punkteret (f.eks. dræn i øret)
- du er allergisk (overfølsom) overfor et af indholdsstofferne i Remo-wax.

#### Særlige patientgrupper

Hvis du har koordinationsproblemer, bevægelsesforstyrrelser eller dine hænder ryster, så bed en anden om at dosere Remo-wax ørespray i din øregang og skylle øret som beskrevet i denne brugervejledning.

#### Børn

Remo-wax bør kun anvendes til børn efter lægens anvisning. Følg nøje den vejledning du har fået. En øreskylling hos børn skal helst foretages af en læge eller sygeplejerske.

#### Brugere med høreapparat

Hvis du bruger et høreapparat, må du først sætte det i igen efter at øret er blevet skyllet og vandet er løbet ud af øret.

#### Mulige bivirkninger

I nogle sjældne tilfælde kan der forekomme lokale allergiske reaktioner i forbindelse med anvendelse af Remo-wax. Ubehagelig fornemmelse i øregangen, hudirritationer og forbigående svimmelhed kan forekomme. Tinnitus kan være et symptom på ørevokspropper, og forbigående tinnitus kan forekomme efter rensning af øret.

Hvis øresprøjten skubbes for dybt ind i øregangen, kan trommehinden beskadiges. Kontakt en læge eller apoteket, hvis du har mistanke om, at Remo-wax har medført bivirkninger hos dig. For at indberette en alvorlig hændelse skal du kontakte fabrikanten og Lægemiddelstyrelsen (Lægemiddelstyrelsen, +45 4488 9595) i den medlemsstat, hvor du har bopæl. Dette er vigtigt for den løbende overvågning af forholdet mellem fordele og risici for produktet.

#### Sådan skal du bruge øresprayen og øresprøjten

##### Løsne ørevokspropper med ørespray

- Opvarm indholdet i flasken med Remo-wax til håndtemperatur (cirka 37°C) ved at holde flasken i hånden et par minutter.
- **Før øresprayen anvendes første gang**, sprayes 3-5 gange f.eks. i et papirlommetørklæde indtil der kommer en jævn stråle. Vend altid øresprayen væk fra dig selv. Hvis øresprayen ikke har været brugt i et stykke tid, skal du teste, at der kommer en jævn stråle ved at spraye 1-2 gange.
- Træk forsigtigt den øverste del af det ydre øre bagud og opad. Hold flasken lodret med øresprayens mundstykke placeret ved indgangen til øregangen. Spray 2-3 doser Remo-wax i øregangen. Træk forsigtigt øreflippen op og ned nogle få gange med en drejende bevægelse. Øregangen kan dækkes med en tot vandskyende vat fugtet med Remo-wax.
- Lad Remo-wax virke i 20-60 minutter. Hvis nødvendigt kan væsken blive i øret natten over.
- Løsn øresprayens mundstykke efter anvendelse, rengør den med mild sæbe, skyl den omhyggeligt, tør den og sæt den tilbage på flasken igen. **Anvend aldrig sprayflasken uden at sprayens mundstykke er fastgjort på flasken!**

Efter anvendelse af Remo-wax ørespray skal øregangen skylles. Du kan bruge Remo-wax øresprøjten til skylning eller kontakt en læge eller sygeplejerske for en øreskylling. Hos børn skal en øreskylling helst foretages af en læge eller sygeplejerske.

##### Øreskylling med øresprøjten

- Før anvendelsen skal øresprøjten skylles igennem hver gang.
- Sug håndvarmt/lunkent vand op i øresprøjten.
- Før forsigtigt spidsen af øresprøjten et par millimeter ind i øregangen og skyl øret ved at trykke let og forsigtigt på øresprøjten.

#### Stik ikke spidsen af øresprøjten dybt ind i øregangen!

- Gentag skylningen nogle gange indtil vandet, der løber ud af øret, er helt klart.
- Skyl øresprøjten igennem og tøm den ved at trykke på den, indtil den er helt tom, efter hver behandling. Lad vandet dryppe ud med spidsen nedad.

#### Anden information

Remo-wax ørespray er kun til personlig brug. Hvis én behandling ikke løser ørevoksproppen, kan du gentage, om nødvendigt, behandlingen med øresprayen og øreskylling i tre på hinanden følgende dage.

**OBS!** Skyl øregangen efter hver behandling.

Hvis du får foretaget øreskylling hos lægen eller en sygeplejerske, så følg hans/hendes anvisninger.

**Øreskylling må aldrig medføre smerte. Hvis du oplever smerte, så stop øreskyllingen og kontakt din læge.**



Undgå kontakt med øjnene. Skyl øjnene med rigeligt vand og kontakt læge, hvis det er nødvendigt.

Hvis du har nogle spørgsmål angående anvendelse af Remo-wax, så kontakt din læge, sygeplejerske eller apoteket.

#### Indholdstoffer

Allantoin (3 mg/ml), etoxileret lanolin, polysorbitat 80, polysorbitat 60, flydende sorbitol, fructosesirup, polyoxetylen stearylether, polyoxyetylen oleylether, lanolinolie, isopropylmyristat, risklidolie, phenethanol, cetylalcohol, butylhydrocytoluen, sorbinsyre, benzethoniumchlorid og vand.  
Øresprøjte: Polyvinylchlorid (PVC).

#### Opbevaring

Må ikke opbevares ved temperatur over 25°C. Opbevar Remo-wax ørespray og øresprøjte utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide produktrester i afløbet eller skraldespanden.

Rester bør afleveres på apoteket til bortskaffelse. Disse foranstaltninger vil bidrage til at beskytte miljøet.

#### Pakningsstørrelser

Remo-wax ørespray 10 ml med øresprøjte

#### Fremstiller

Remo-wax:  
Orion Corporation Orionintie 1  
FI-02200 Espoo, Finland



#### Øresprøjte:

Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG  
Maerkische Strasse 35  
58675 Hemer, Tyskland



#### Distributør i Danmark

Orion Pharma A/S  
Ørestads Boulevard 73  
DK-2300 København S  
Danmark  
Tel. +45 8614 0000  
www.orionpharma.dk

**Denne brugervejledning blev senest revideret 02.11.2023**



Medicinsk udstyr



Se brugervejledningen



Forsigtig



Fabrikant



Fremstillingsland



Distributør



Oversættelse



Maks. temperatur



Anvendes inden/udløbsdato



Batchkode